

ATKĀRTOTI LIETOJAMA HIGIĒNISKĀ SEJAS MASKA



Oeko-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Šis sertifikāts garantē tekstilizstrādājumu neitoksiskumu

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Divslāņu maska izstrādāta saskaņā ar
AFNOR SPEC S76 – 001:2020 standartiem

Modelis:
MDAL 01 (pieaugušajam)
MDAL 01/ KID (bērnam)

Filtrācijas efektivitāte: > 90 %, +/- 3 µm daļiņām
Rezultāts pēc 30 mazgāšanas reizēm 98 %

Gaiscaurlaidība: > 96 L.m-2.s-1
pie vakuuma 100 Pa
Rezultāts pēc 30 mazgāšanas reizēm:
1050 L.m-2.s-1 (11 reizes augstāka kā
prasītais līmenis)

Testēšana un sertificēšana veikta Francijā:
maska testēta 30 mazgāšanas reizēm,
nodrošinot filtrācijas efektivitāti
- Directorate Genral of Armaments (DGA) un
- Francijas tekstila un apģērba Institutā (IFTH)


Maskas atbilst higiēnisko masku 1. kategorijai

Izmantoti Vācijas tekstilmateriālu ražotāja neaustie
materiāli, kas rekomendēti higiēnisko masku
izgatavošanai, sertifikāts: ISO 9001/ 2015.

Ārējais slānis: 100 % poliesters (svars: 51 g/m²)

Iekšējais slānis: 65 % poliamīds,
35 % poliesters (svars: 32 g/m²)

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

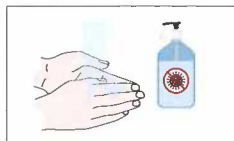


1. Pirms uzlikt masku, jāmazgā
rokas ar ūdeni un ziepēm vai
dezinficējošu līdzekli.



2. Uzlikt masku, ņemot to aiz
gumijas cilpām, ar ielocēm vir-
zienā no augšas uz leju, labajā
pusē ar zaļo nošuvi, kreisajā
pusē ar sarkano (ja maska uz-
likta uz sejas) ar gumijas cilpām
aiz ausīm, tās nekrustojot.

3. Pārbaudīt, lai maska pilnībā
nosedz degunu un zodu. Kad
maska uzlikta uz sejas, to neaiz-
tikt ar rokām.

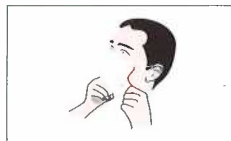

4. Masku ņemt, satverot aiz
gumijas cilpām no mugur-
pusēs, neskarot priekšpusi.
Pēc maskas noņemšanas no-
drošināt, ka lietotā maska, līdz
mazgāšanai vai iznīcināšanai,
nenonāk saskarsmē ar ci-
tiem priekšmetiem un dzīvām
būtnēm. Ieteicams to ievietot
slēgtā konteinerī (piem., plast-
masas maisiņā). Ja maska
valrāk netiks lietota, maisiņu
ievieto atkritumu tvērtņē.

IETEIKUMI MASKU KOPŠANAI

Pirms pirmās lietošanas un starp katru
lietošanas reizi:



Mazgāt veļas mašīnā 60 °C saudzējošā režīmā,
ne ilgāk kā 30 minūtes. Lai izvairītos no pilinga
efekta, samazināt centrifūgas apgriezienu
skaitu. Ieteicams mazgāt konteineros
(maisīnos).



Nelietot hlora saturošus un audumus
mikstinošus līdzekļus.



Žāvēt saudzīgā režīmā, zemākā temperatūrā,
ieteicams konteineros (maisīnos).



Īslaicīga gludināšana 110 °C, ieteicams
gludināt caur plānu audumu.



Atļauts tīrīt ar perhloretilēnu.

IEVĒROT

- Higiēniskā maska paredzēta lietošanai sabiedriskās vietās, lai papildinātu aizsargnorāžu un sociālās distancēšanās noteikumus.
- Tā domāta plašākai sabiedrībai, īpaši jebkuram veselam cilvēkam, kā arī cilvēkiem bez slimības simptomiem.
- Šī maska nav paredzēta aprūpes darbinieku lietošanai, kontaktējoties ar pacientiem.

Maskas valkāšana

Maskas maksimālais valkāšanas laiks: 4 stundas

Izgatavotājs:
SIA SOLUTIONS
Vārnu iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija
e-pasts: maskas.solutions@gmail.com